




Údržba násadců pro implantologii a chirurgii

Zdravotnické zařízení je dodáváno v "nesterilním" stavu. Ujistěte se, že je tento postup dodržován i před prvním použitím nástroje.

1 Příprava

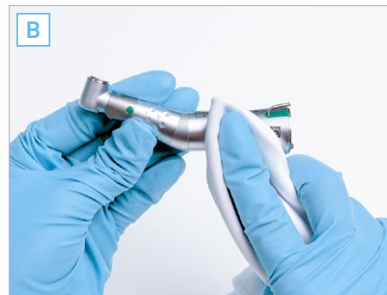

A. ODSTRANĚNÍ VRTÁČKU



- Vyměňte vrták z upínacího mechanismu
- Odejměte násadec od mikromotoru

B. PRVOTNÍ DEZINFEKCE

- Povrchová dezinfekce

⊘ Neponožte nástroj do dezinfekční lázně.

2 Čištění

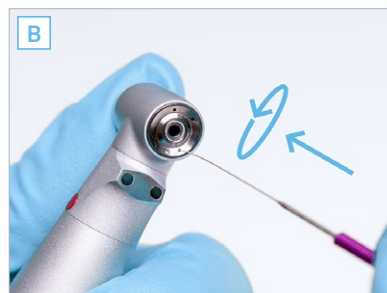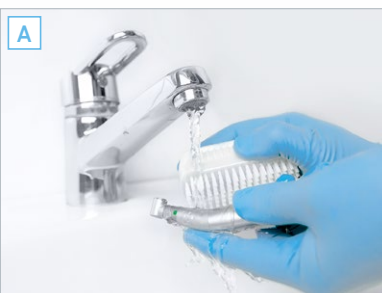


A. ČIŠTĚNÍ POD TEKOUCÍ VODOU <38°C

B. ODSTRANĚNÍ NEČISTOT

- Opatrně odstraňte všechny stopy nečistot nebo usazenin pomocí čističích jehel Bien-Air
- Trysky vysušte vzduchem a pak otřete zbytek nástroje


Neponožte do ultrazvukové čističky

⊘

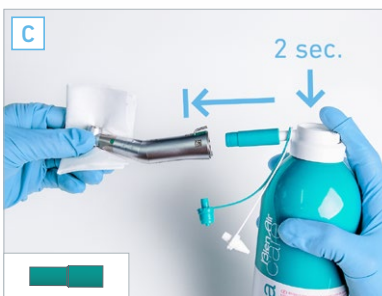

C. VNITŘNÍ ČIŠTĚNÍ S AQUACARE

- Před použitím Spraynet protřepejte
- Použijte redukci Aquacare* ①
- Udržujte hlavičku nástroje směrem dolů a stiskněte tlačítko spreje Aquacare po dobu 2 sekund
- Použijte redukci Aquacare* ②
- Udržujte hlavičku nástroje směrem dolů a stiskněte tlačítko spreje Lubrifluid po dobu 1 sekundy

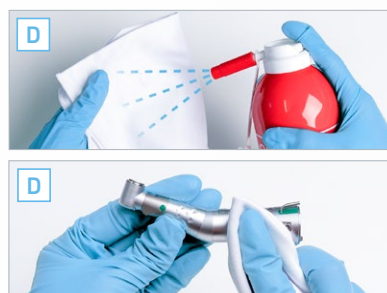

D. VNITŘNÍ A EXTERNÍ ČIŠTĚNÍ SPRAYNETEM

- Před použitím Spraynet protřepejte
- Použijte redukci Spraynet* ①
- Udržujte hlavičku nástroje směrem dolů a stiskněte tlačítko spreje Spraynet po dobu 1 sekundy
- Vnější část násadce vyčistěte hadříkem napuštěným Spraynetem

3 Dezinfekce



A. POVRCHOVÁ DEZINFEKCE
(Dle instrukcí výrobce vašeho dezinfekčního prostředku)

NEBO

B. TERMÁLNÍ DEZINFEKCE
(Dle instrukcí výrobce termální čističky)

⊘ Neponořujte přístroj do dezinfekční nádoby



4 Mazání



A. MAZÁNÍ SPREJEM LUBRIFLUID

- Před použitím sprej Lubrifluid protřepejte
- Použijte redukci Lubrifluid* ①
- Udržujte hlavičku nástroje směrem dolů a stiskněte tlačítko spreje Lubrifluid po dobu 1 sekundy
- Poté, spusťte provozní test turbiny po dobu 30 sekund na nízké úrovni otáček. Přebytké mazivo se tímhle testem odstraní pryč z turbiny.
- Přemazaný násadec uchovávejte se hlavičkou směřující dolů tak, aby z ní mohli vytékat všechny zbytky oleje.

5 Sterilizace



A. VLOŽTE NÁSADEC DO STERILIZAČNÍHO SÁČKU

B. STERILIZUJTE V SOULADU S INSTRUKCEMI VÝROBCE AUTOKLÁVU

- Nářadí ozčené symbolem: , je možné sterilizovat v autoklávu

⚠ Sterilizujte pouze nářadí, které bylo očištěno a promazáno

* Všechny odkazy na vybrané násady spreje jsou uvedeny na poslední stránce dokumentu.



SPRAYNET
500 ml čistící sprej
REF. 1600036-001



Čištění násadce



LUBRIFLUID
500 ml mazací sprej
REF. 1600064-001



Mazání násadce



AQUACARE
500 ml čistící sprej
REF. 1600064-001



Čištění vnitřku násadce od agresivních solí fyziologického roztoku



Čištění přívodního kanálku od agresivních solí fyziologického roztoku



LUBRICARE polo-automatický systém čištění a mazání
REF. 1600915-001



LUBRIMED vazelína
REF. 1600037-006



BIEN-AIR čistící jehla
REF. 1000001-010