

Každodenní údržba implantologických a endo násadců

Pro skvělou kondici a maximální živostnost vašich násadců Bien-Air doporučujeme tuto údržbu provádět každý den po konci pracovní doby. Implantologické a endodontické násadce jsou dodávány v ne-sterilním stavu. Ujistěte se, že je tento postup dodržován i před prvním použitím násadce.

01. Příprava




Vyjměte vrtáček z upínací kleštiny násadce a odepněte násadec od mikromotoru.




Provedte povrchovou dezinfekci pomocí netkaného hadříku a dezinfekčního prostředku na nástroje.

02. Čištění

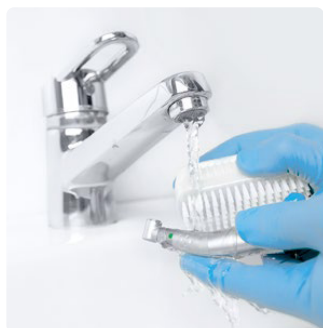

Očistěte násadec pod tekoucí vodou o teplotě do 38 °C a očistěte ji jemným kartáčem.

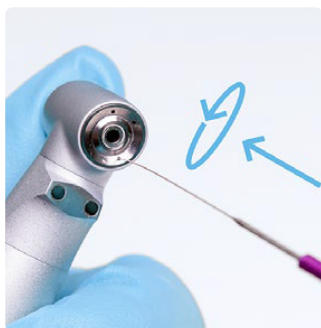


Opatrně odstraňte nečistoty a usazenin pomocí čistící jehly. Trysky vysušte vzduchem a otřete násadec.

nekládejte násadec do ultrazvukové čističky



koupit Aquacare

Protřepejte Aquacare a vyberte vyznačenou redukci. Nástroj udržujte směrem dolů a aktivujte Aquacare na 2 s.

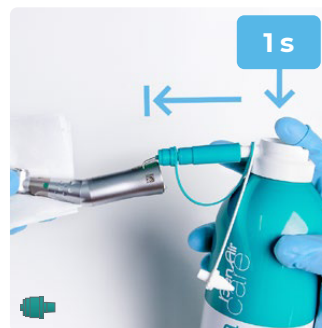


Použijte druhou redukci, udržujte stále nástroj směrem dolů a aktivujte Aquacare na 1 s.



koupit Spraynet

Protřepejte Spraynet a vyberte vhodnou redukci. Hlavičku nástroje udržujte směrem dolů a aktivujte Spraynet na 1 s.

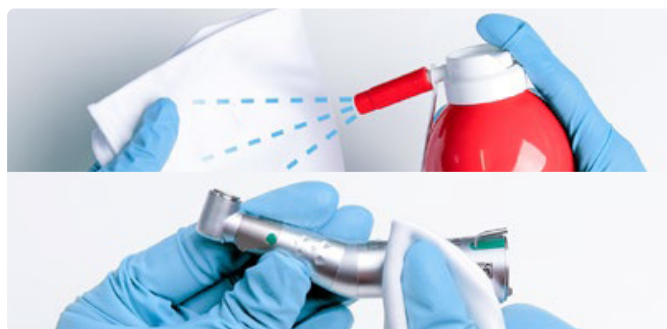


Vnější část násadce vyčistěte hadříkem napuštěným Spraynetem.

03. Dezinfekce

neponořujte násadec do dezinfekční lázně



nebo

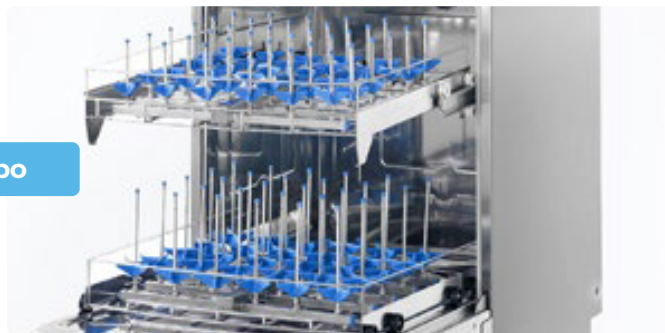

Proved'te povrchovou dezinfekci podle instrukcí výrobce vašeho dezinfekčního prostředku.

Proved'te termální dezinfekci podle instrukcí výrobce vaší termální čističky.

04. Mazání

koupit Lubrifluid

1 s



Pro správné promazání násadce použijte Lubrifluid. Sprej protřepejte a nasad'te redukci č. 1. Udržujte hlavičku nástroje směrem dolů a aktivujte sprej po dobu 1 s. Poté, spust'te násadec po dobu 30 s na nízké otáčky pro odstranění přebytečného maziva.



Promazaný násadec uchovávejte s hlavičkou směřující dolů tak, aby z násadce mohl odtéci zbylý olej.

05. Sterilizace



Vlož'te turbínku do sterilizačního sáčku a uzavřete. Sterilizujte pouze očištěnou a promazanou turbínku.



Sterilizujte dle postupu výrobce autoklávu pouze turbíny označené symbolem na obrázku.



Čistící sprej **Bien-Air Spraynet** uvolňuje usazeniny vzniklé během provozu nástroje a odstraní zbytky starého oleje. Balení obsahuje 500 ml.

koupit Spraynet

Mazací sprej **Bien-Air Lubrifluid** po aplikaci čistícího spreje Bien-Air Spraynet. Balení obsahuje 500 ml.

koupit Lubrifluid

Čistící sprej **Bien-Air Aquacare** pro nástroje s fyziologickou tekutinou pro čištění chirurgických násadců. Balení obsahuje 500 ml.

koupit Aquacare