

Každodenní údržba kolénkových násadců

Pro skvělou kondici a maximální živostnost vašich stomatologických násadců Bien-Air doporučujeme tuto údržbu provádět každý den po konci pracovní doby. Stomatologické násadce jsou dodávány v ne-sterilním stavu. Ujistěte se, že je tento postup dodržován i před prvním použitím násadce.

01. Příprava




Vyjměte vrták z upínací kleštiny a odejměte násadec od mikromotoru.




Proved'te povrchovou dezinfekci pomocí netkaného hadříku a dezinfekčního prostředku na nástroje.

02. Čištění

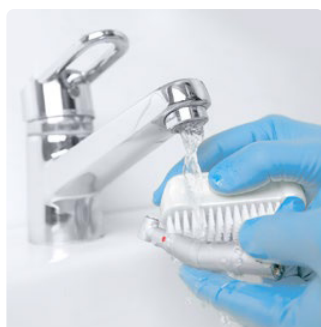

Očistěte násadec pod tekoucí vodou o teplotě do 38 °C a očistěte jej jemným kartáčem.

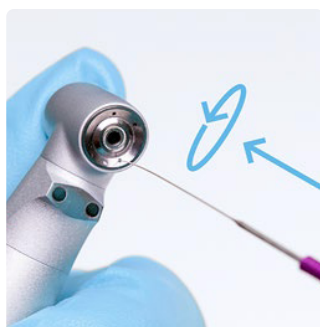

Opatrně odstraňte všechny nečistoty a usazenin pomocí čistící jehly. Trysky vysušte vzduchem a otřete násadec.

nevkládejte násadec do ultrazvukové čističky



Protřepete Spraynet a vyberte vhodnou redukci. Hlavičku nástroje udržujte směrem dolů a aktivujte Spraynet na 1 s.




Vnější část násadce vyčistěte hadříkem napuštěným Spraynetem.

03. Dezinfekce



Proved'te povrchovou dezinfekci podle instrukcí výrobce vašeho dezinfekčního prostředku.

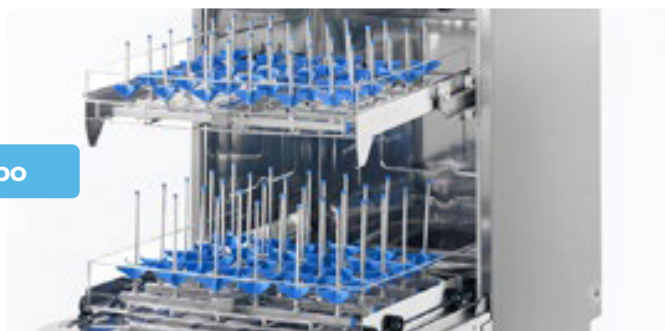

Proved'te termální dezinfekci podle instrukcí výrobce vaší termální čističky.

04. Mazání



Pro správné promazání násadce použijte Lubrifluid. Sprej protřepejte a nasadte redukci č. 1. Udržujte hlavičku nástroje směrem dolů a aktivujte sprej po dobu 1 s. Poté, spustte násadec po dobu 30 s na nízké otáčky pro odstranění přebytečného maziva.



Promazaný násadec uchovávejte s hlavičkou směřující dolů tak, aby z násadce mohl odtéci zbylý olej.

05. Sterilizace



Vložte násadec do sterilizačního sáčku a sáček uzavřete. Sterilizujte pouze násadec, který byl očištěn a promazán.



Sterilizujte v souladu s instrukcemi výrobce autoklávy. Sterilizovat v autoklávu lze sterilizovat pouze násadce označené symbolem na obrázku.



Čistící sprej **Bien-Air Spraynet** pro nástroje a jejich příslušenství. Uvolňuje usazeniny vzniklé během provozu nástroje a odstraní zbytky starého oleje. Balení obsahuje 500 ml.

koupit Spraynet

Mazací sprej **Bien-Air Lubrifluid** pro násadce a turbíny určený pro všechny nástroje značky Bien-Air. Před aplikací na nástroje se doporučuje použít červený čistící sprej Bien-Air Spraynet. Balení obsahuje 500 ml.

koupit Lubrifluid