

Každodenní údržba turbínek Bien-Air

Pro skvělou kondici a maximální živostnost vašich stomatologických turbínek Bien-Air doporučujeme tuto údržbu provádět každý den po konci pracovní doby. Stomatologické turbínky jsou dodávány v ne-sterilním stavu. Ujistěte se, že je tento postup dodržován i před prvním použitím násadce.

01. Příprava




Vyjměte vrtáček z upínací kleštiny turbínky.



Proved'te povrchovou dezinfekci pomocí netkaného hadříku a dezinfekčního prostředku na nástroje.

02. Čištění

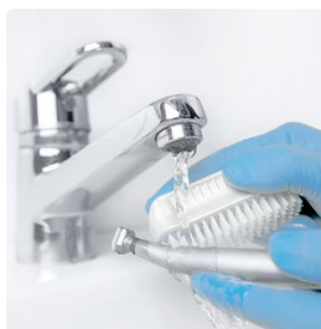

Očistěte turbínku pod tekoucí vodou o teplotě do 38 °C a očistěte ji jemným kartáčem.




Opatrně odstraňte nečistoty a usazenin pomocí čistící jehly. Trysky vysušte vzduchem a otřete turbínku.

nekládejte násadec do ultrazvukové čističky



Protřepejte Spraynet a vyberte vyznačenou redukci. Nástroj udržujte směrem dolů a aktivujte Spraynet na 1 s.

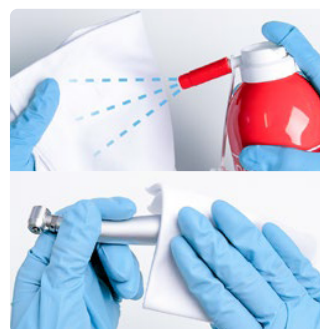


Vnější část turbínky vyčistěte hadříkem napuštěným Spraynetem.

pro 2/3cestné a 4cestné turbínky



Protřepejte Spraynet a vyberte vyznačenou redukci. Hlavičku nástroje udržujte směrem dolů a aktivujte Spraynet na 1 s.

nekládejte násadec do ultrazvukové čističky

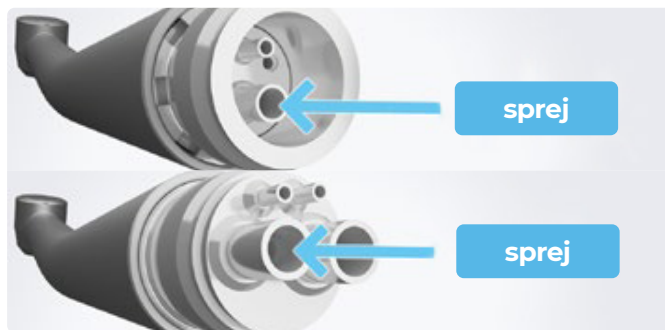


Prostříkňte pouze otvory 2/3cestné nebo 4cestné turbínky, které jsou označeny modrou šipkou.

03. Dezinfekce



nebo

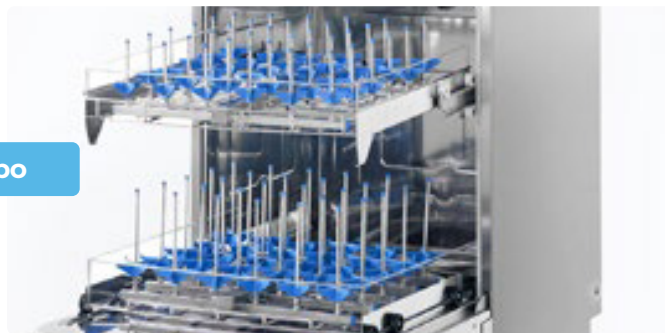

Proved'te povrchovou dezinfekci podle instrukcí výrobce vašeho dezinfekčního prostředku.

Proved'te termální dezinfekci podle instrukcí výrobce vaší termální čistíčky.

04. Mazání



Zasuňte mazací vazelínu Bien-Air Lubrimed do upínací kleštiny turbínky.



Namažte turbínku otočením vazelíny o půl otáčky patrony.




Lubrifluid protřepejte a nasad'te redukci č. 2, 3 nebo 4. Hlavičku udr'žujte směrem dolů a aktivujte sprej po dobu 1 s. Poté, spus'tte turbínku po dobu 30 s na nízké otáčky pro odstranění přebytečného maziva.

pro 2/3cestné a 4cestné turbínky



Protřepejte Spraynet a vyberte vyznačenou redukci. Nástroj udr'žujte směrem dolů a aktivujte sprej na 1 s.

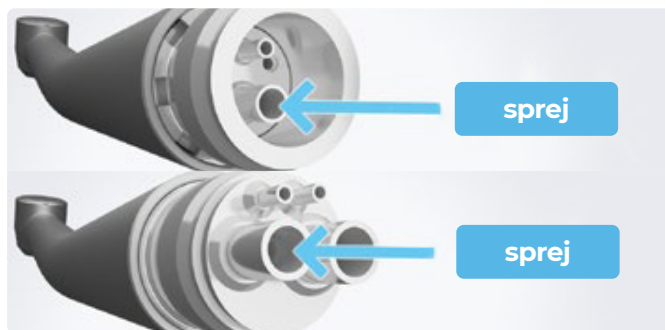

Prostříkněte pouze otvory 2/3cestné nebo 4cestné turbínky, které jsou označeny modrou šipkou.

05. Sterilizace



Vložte turbínku do sterilizačního sáčku a uzavřete. Sterilizujte pouze očištěnou a promazanou turbínku.



Sterilizujte dle postupu výrobce autoklávu pouze turbínky označené symbolem na obrázku.